

Richtlijnen voor inzenden materiaal voor cytologisch onderzoek

Materiaal	Verpakking	Fixatief	Bewaartemperatuur	Transport	
				tijd	temperatuur
Gynaecologie Cervix, vagina of vulva uitstrijkjes	Thinprep fixatief vials	Thinprep	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)	n.v.t.	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)
Long bronchusbrush	Uitstrijkpreparaten laten drogen aan de lucht (evt föhnen) Afgeknipte brush meesturen!	Thinprep 50 ml nongyn buis met 30 ml Cytolyt.	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)	n.v.t.	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)
Long bronchusspoeling, sputum, BAL	Materiaal direct overbrengen in 30 ml Cytolyt solution	Thinprep 50 ml nongyn buis met 30 ml Cytolyt	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)	n.v.t.	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)
Urine/ blaasspoeling	Fixeren met Cytolyt solution in verhouding Cytolyt-urine van 3:1 (i.c. 10 ml urine toevoegen aan potje)	Thinprep 120 ml urinepotjes met 30 ml Cytolyt	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)	n.v.t.	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)
Liquor	Materiaal (ca 5 cc) overbrengen in 30 ml Cytolyt Solution	Thinprep 50 ml nongyn	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)	n.v.t.	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)

		buis met 30 ml Cytolyt			
FNA/ punctie	<p>Uitstrijkpreparaten laten drogen aan de lucht (evt föhnen).</p> <p>Spoel de naald met Cytolyt solution</p> <p>NB: Geen spuiten met naalden insturen!</p>	Thinprep 50 ml nongyn buis met 30 ml Cytolyt	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)	n.v.t.	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)
Sereuze vochten (ascites, pleura- / cyste- / pericard- / gewrichtsvocht)	<p>Voldoende grote, goed afsluitbare buis.</p> <p>NB1: Geen spuiten met naalden / vacuümcontainers insturen!</p> <p>NB2: Bloederige vochten eventueel antistollen door 1 druppel heparine per ml vocht toe te voegen.</p>	<p>VERS insturen</p> <p>(max 100 ml)</p>	Vocht dat buiten de openingstijden van het laboratorium wordt afgenomen dient gekoeld (in koelkast) bewaard worden en de eerstvolgende werkdag z.s.m. worden ingestuurd.	<24 uur	Kamertemperatuur (10°C - 30°C)