

## Richtlijnen voor inzenden materiaal voor histologisch onderzoek

| Materiaal           | Verpakking  | Fixatief                                     | Bewaartemperatuur   | Transport |                                |
|---------------------|---|--|---|-----------|--------------------------------|
|                     |   |  |   | tijd      | temperatuur                    |
| Vers                | Voldoende grote, goed afsluitbare pot   | n.v.t.                                       | Materiaal afgenomen buiten de openingstijden van het laboratorium gekoeld bewaren (in koelkast).  | <24 uur   | Kamertemperatuur (10°C - 30°C) |
| Vriescoupe          | Voldoende grote, goed afsluitbare pot   | n.v.t.                                       | n.v.t.  | n.v.t.    | n.v.t.                         |
| Huidbiopt voor IF   |   | NaCL 0.9%                                    | Kamertemperatuur (10°C - 30°C)  | <24 uur   | Kamertemperatuur (10°C - 30°C) |
| Formaline gefixeerd | Voldoende grote, goed afsluitbare pot (ruim genoeg dat materiaal niet vervormd)<br><br>Materiaal moet zich geheel in/onder formaline 4% bevinden, eventueel een tissue gebruiken om af te dekken. | Formaline 4%<br><br>Weefsel : formaline 1:10 | Materiaal dat buiten de openingstijden van het laboratorium wordt afgenomen dient op kamertemperatuur bewaard te worden, NIET in de koelkast. | n.v.t.    | Kamertemperatuur (10°C - 30°C) |